



Estimado usuario,

Enhorabuena por su elección y la adquisición del protector facial PROTECTOR180. Le ayudará en sus tareas del día a día ofreciendo mayor protección a agentes patógenos y contaminantes. Además si utiliza el protector facial estará menos expuesto a las amenazas que puedan rodearle. La pantalla facial está fabricada en la Unión Europea cumpliendo con toda la normativa y regulación internacional y de la UE en lo referente a este tipo de material de protección. Como fabricantes de reconocido prestigio podemos asegurar que la pantalla PROTECTOR180 está fabricada cumpliendo con todos estándares y alta calidad de alta higiene tal y como está conformado por nuestro certificado BRCGS. La pantalla PROTECTOR180 está compuesta de un material de alta flexibilidad irrompible, muy ligero y transparente (PET reciclable de alta calidad). Puede ser desinfectada con detergentes o solución alcohólica utilizando un paño suave para extender el agente. Nos preocupamos por el medio ambiente, por lo que nuestra pantalla es muy sencilla de reciclar - (el 100% del material es reciclable si no consideramos la almohadilla).

No deje de observar todas las medidas higiénicas recomendadas por las autoridades sanitarias. Tratamos de mejorar nuestros productos constantemente por lo que si desea realizarnos cualquier observación o comentario, por favor compártalo con nosotros. Puede hacerlo vía [www.pantalla-covid.com](http://www.pantalla-covid.com)

## MANUAL PANTALLA DE PROTECCIÓN FACIAL PROTECTOR180

(Video Tutorial disponible en nuestra web: [pantalla-covid.com](http://pantalla-covid.com))

### I Preparación

- Desinfecte y lave sus manos para evitar dejar huellas y otros marcas sobre la superficie de la pantalla. Luego extienda todos los componentes incluidos en la bolsa sobre una superficie lisa: pantalla, correa de sujeción, etiqueta de personalización y almohadilla de confort (fig. A). Si no tiene una superficie limpia, puede extender la tarjeta de la bolsa sobre el suelo y utilizarla como almohadilla.
- Escriba el mensaje que desee mostrar al mundo en la etiqueta personalizable. Puede ser su nombre, puesto de trabajo, saludo, frase favorita... (fig. B).


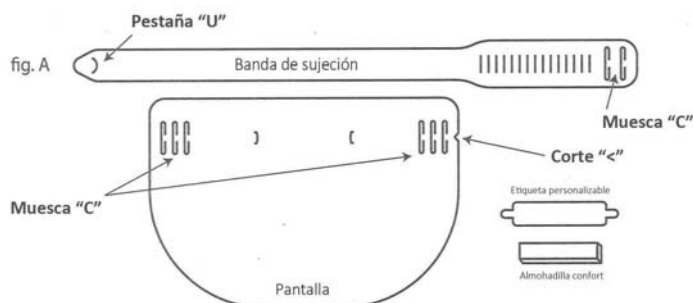


fig. B

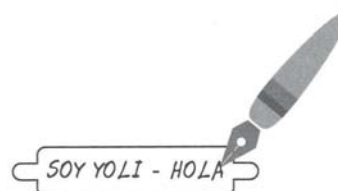

### II Montaje

- Coloque la pantalla frente a Ud. de forma que el corte "<" quede a su derecha (fig. A)
- Comenzando por el lado derecho, pase el final estrecho de la banda de sujeción a través de las tres muescas "C" empezando por la parte de abajo (fig. C)
- Tire de la banda y pásela por las otras tres muescas del otro lado de la pantalla.
- Dele la vuelta a la pantalla y coloque la etiqueta personalizada en las muescas que hay en el centro de la pantalla (fig. D)
- Vuelva a darle la vuelta a la pantalla de forma que la parte estrecha de la banda vuelva a quedar a su izquierda.


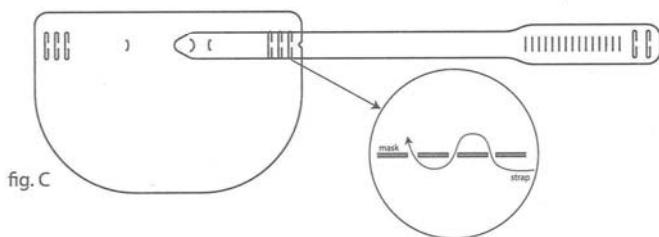


fig. D

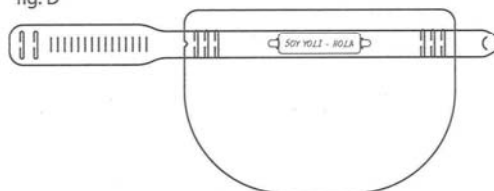

### III Fijando la banda

- Apriete la banda, creando un cierto ángulo en la pantalla
- Pase la parte estrecha de la banda a través de las dos muescas de la parte ancha de la banda, empezando por el lado superior (fig. E).
- Preajuste la longitud de la banda al diámetro de su cabeza.
- Presione la pestaña "U" de la parte estrecha en la muesca "I" en la parte ancha de la banda. Asegúrese de que queda bien ajustada

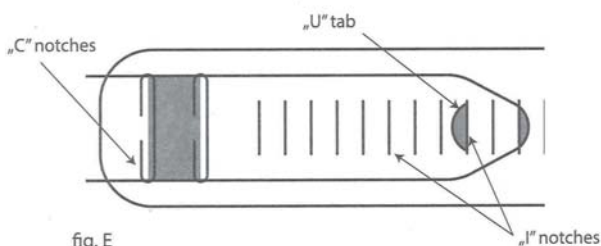


fig. E

### IV Ajustando la pantalla

- Ajuste el ángulo de la pantalla (deslicela un poco hacia afuera si lleva gafas)
- Decida si necesita pegar la almohadilla para disfrutar de un confort extra. Por favor, recuerde quitar la almohadilla y la etiqueta personalizada antes de desechar la pantalla en el contenedor AMARILLO. La barra acolchada debe tirarse al contenedor GRIS, y la etiqueta en el AZUL (fig. F).

fig. F

foam bar

